

Instruktion för påtagning (1/2)

Bra att veta:

- Den kompletta masken skyddar mot såväl dropp- som aerosolsmitta
- Masken inkluderar en fläkt-och batterienhet kopplad till ett HEPA partikelfilter (P3)
- Fläkten skapar ett positivt tryck på insidan av masken vilket gör det lättare att andas
- Innan användning ska alltid en kontroll av storlek och passform göras (se separat instruktion)

1 Säkerställ att det inte är några synliga skador eller smuts på masken och att batteriet är fullt laddat.



2 Sätt fast det vita inblåsfiltret på toppen av masken genom att hålla det i 30-graders vinkel i ett fast och stadigt tryck samt försiktigt vrida åt höger. För att undvika att skada kopplingen, håll andra handens fingrar under fläkten på insidan av masken och applicera ett lätt tryck uppåt samtidigt som du vrider filtret på plats.*



3 Fäst det gröna utandningsfiltret genom att placera filtret i en 30 graders vinkel över fläktens bajonettöppning. Tryck försiktigt nedåt och vrid det åt höger.
Obs: Tvinga inte in den på plats. Du borde höra ett lätt klick när du vrider filtret i bajonetten.



4 Återställ fläktenheten:
1) håll masken upp och ner.
2) tryck samtidigt ner båda knapparna tills de två högra (vänstra från ditt håll) lysdioderna tänds och den längst till höger slutar blinka (fläkten ska inte starta).
3) Släpp knapparna.

Fläkten är nu återställd.



5 Sätt på dig masken.



* NOTERA: Ibland kan det vara lite svårt att vrida på filtret när det är nytt. Om så är fallet, använd inte våld, det kan skada gångorna! Säkerställ istället att filtret ligger tätt mot gängan och att du inte håller det snett. Vrid sedan med ett lätt men stadigt tryck och applicera samtidigt lite tryck uppåt med din andra hand under fläkten. När filtret vrids på korrekt ska du känna ett mjukt motstånd och filtret ska hamna rakt i förhållande till fläkten. Ju fler gånger du använder filtret, desto lättare är det att sätta fast.

Instruktion för påtagning (2/2)

6 Se till att masken sitter tätt mot ansiktet, men inte för hårt för att orsaka obehag. Om remmarna behöver dras åt ska du justera uppifrån och ned, dvs justera först den övre remmen på selen och dra åt den vid behov. Känn passningen på sidorna, justera vid behov lite på båda remmarna på sidorna av masken. Justera endast den nedre remmen om det behövs. Om masken sitter för hårt, lossa remmarna lite. OBS! Se till att det inte finns något som täcker tätningen runt ansiktet (t.ex. hår eller ett hårskydd) som kan orsaka läckage.



7 Starta fläkten genom att hålla in strömknappen i 3 sek. Ta några djupa andetag. Fläkthastigheten justeras automatiskt och optimerar luftflödet i masken.



8 Testa larmet genom att sätta två fingrar mellan tätningen och ansiktet så att det blir en glipa.

Efter 2 sekunder ska larmet sätta igång med ett blinkande ljus och ett pipande ljud varje sekund.

När glipan sluts, ska larmet upphöra efter några sekunder.



DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.

Användarinstruktion

- Den vänstra lampan på masken lyser alltid när fläktenheten är på.
- För att justera hastigheten på fläkten, tryck uppreparade gånger på av/på-knappen. Hastigheten justeras lite för varje klick. Du hör och känner hur fläktens hastighet ändras. När fläkten går från hög till låg hastighet igen, är den åter i automatiskt läge och justerar luftflödet automatiskt.
- Om den högra röda lampan börjar blinka och du hör ett ljudlarm var femte sekund, är batteriet på väg att ladda ur och ungefär 15 minuter batteritid återstår.
- Det går att ansluta ett externt batteri till masken (se separat instruktion). Batteritiden förlängs då med ungefär 10 extra timmar.
- Du tändar och släcker LED-lampan genom att trycka på knappen "Ljus på/av".
- Om de två lamporna till höger börjar blinka och du hör en ljudsignal varannan sekund indikerar detta att filtret antingen är blockerat eller att det finns ett större läckage som orsakar undertryck i masken. Lämna området omedelbart.
 - Om fläkten varnar för låg batterinivå, lämna området omedelbart och ladda fläkten enligt instruktionerna innan du använder masken
 - Om fläkten varnar för undertryck i masken, lämna området omedelbart och byt filter. Om det fortfarande finns ett undertryckslarm, kontrollera om det är läckage eller om masken är skadad.

DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.

Instruktion för avtagning

1 Ta av masken genom att fatta tag i spännbandets ögla.



2 Dra ut och över huvudet. Tillse att masken inte vidrör arbetsdräkten.



3 Undvik att röra vid ansiktet och framsidan av masken.



4 Placera masken på en avställningsyta.



DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.

Instruktion för laddning

1 Skruva av skruven på maskens vänstra sida. Se till att du förvarar skruven på en säker plats så att den inte tappas bort.



2 Anslut laddaren genom att rikta in de tre stiften mot motsvarande hål och skjuta in kontakten. Ladda tills indikatorlampan på laddaren lyser grönt och batteriet är fulladdat. Se till att koppla ur laddaren när laddningen är klar.



DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.

Instruktion för anslutning av extrabatteri

1 Fatta tag i batterikabeln och trä den genom öglan på spännbandets vänstra sida.



2 Anslut kabeln till det externa batteriet.



3 Skruva av skruven på maskens vänstra sida. Se till att du förvarar skruven på en säker plats så att den inte tappas bort.



4 Anslut batterikabeln till fläktenheten i masken genom att rikta in de tre stiften mot motsvarande hål och skjuta in kontakten. Dra åt skruven. Se till att kabeln löper fritt.



5 Starta fläkten genom att hålla in strömknappen i 3 sek.



6 Lägg det externa batteriet i en ficka eller fäst det med hjälp av klämman på dina kläder eller ett bälte.



OBS! Det externa batteriet ska kopplas bort från fläktenheten när masken inte används, annars kommer batteriet att laddas ur.

DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.

Instruktion för rengöring (1/2)

1 Ta av filtren genom att vrida dem 30-grader till vänster.

Om filtren ska återanvändas, kan de rengöras med desinfektionsmedel på samma sätt som masken eller värmas i en rengöringsugn. Är filtren förbrukade ska de kasseras på anvisad plats.



2 Placera masken på en steril yta.



Behöver du ta ut fläktenheten?

Om du behöver byta batteri eller om du ska dela masken med någon annan och därför behöver göra en komplett rengöring av masken, så ska du avlägsna fläktenheten innan rengöring. Om inte, låter du fläktenheten sitta kvar och fortsätter till instruktion nr 5.

3 Skruva av skruven på maskens vänstra sida. Se till att du förvarar skruven på en säker plats så att den inte tappas bort.



4 Placera en hand på insidan av masken, med tummen mellan masken och fläkten och de andra fingrarna under fläkten. Placera andra handens tumme i hålet på ovansidan av fläkten och tryck försiktigt nedåt tills fläkten lossnar. Dra ut fläkten. Den ska glida ut lätt utan att du behöver ta i.



Instruktion för rengöring (2/2)

5 Ta en tvättlapp, rikligt indränk med ytdesinfektions-medel med tensider.



6 Börja med att rengöra utsidan.



7 Fortsätt med spännbanden. Se till att vara noggrann med de lite mer svåråtkomliga delarna såsom spännen.



8 Ta en ny tvättlapp med desinfektionsmedel och rengör insidan av masken noga.



9 Var försiktig med insidan av fläktenheten och eventuella filter. Undvik att "dränka in" dessa delar med desinfektionsmedel.



10 Låt torka i väntan på nästa användning.



DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.

Instruktion för kontroll av täthet och passform

Tiki medical finns tillgänglig i tre storlekar: small, medium och large.

Före användning måste en kontroll göras av täthet och passform, för att säkerställa att masken sluter tätt mot ansiktet. När testet genomförs ska varken fläktenhet eller filter vara monterade på masken.

1 Sätt på dig masken (utan fläktenhet och filter) och justera spännbanden för att säkerställa att masken sitter tätt och bekvämt mot ansiktet.



2 Lägg en pappersbit överst på masken och se till att den täcker båda hålen. Sätt samtidigt ett finger för att täcka laddningshålet på sidan av masken.



3 Försök att försiktigt andas in.



Om kontrollen lyckas, ska du inte kunna andas in och masken ska tryckas mot ditt ansikte när du försöker göra det.

Om kontrollen inte lyckas, kommer du att känna att luft läcker in i masken. Försök att förstå vad läckan kommer ifrån och åtgärda den. Kanske måste du justera spännbanden eller byta till en annan storlek. Andra saker som kan påverka tätheten kan till exempel vara kraftig skäggväxt, glasögon eller hår som faller ner i masken.

Om masken fortsätter att läcka trots justeringar och kontrollen inte lyckas, ska masken inte användas.

DISCLAIMER: Denna manual ersätter på intet sätt användarmanualen och förutsätter att användaren är fullt informerad och insatt i såväl Tiki-masken som miljön den ska användas i, riskerna förknippade med sådan miljö, samt med arbetsplatsens riktlinjer, lokala lagar och restriktioner.